

12. ハンドピースの注油

- ① ハンドピースのモータージョイント部にEタイプ用スプレーノズル（付属品）を差し込みます。



- ↓ 差し込む向きは特にありません。
- ↓ ハンドピースからはずれないように奥までしっかり差し込みます。

- ② 注油スプレー缶のノズルにEタイプ用スプレーノズル（付属品）を差し込みます。




- ↓ 必ず歯科ハンドピース用のオイルをご使用ください。
- ↓ ご使用になるオイル缶に記載されている注意事項を守ってご使用ください。

- ③ ハンドピースのバー挿入口を下向きにし、ハンドピースがノズルから外れないよう手で押さえながら、2～3秒間、オイルをスプレーします。



- ↓ 注油缶は平らな台の上に置いてスプレーしてください。

- ④ バー挿入口から出てきたオイルが汚れている場合は、きれいなオイルが出てくるまで、手順③を繰り返します。

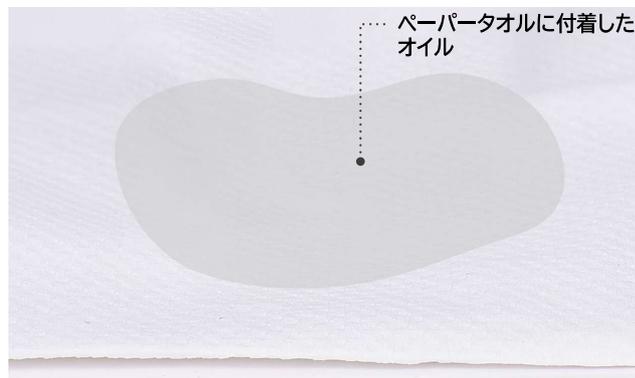

- ↓ 異物や黒ずみのないオイルが出てきたら注油完了です。

- ⑤ ハンドピース内の余分なオイルを排出するため、モーターに接続し、20秒～30秒ほど空運転をおこないます。



- ↓ 空運転中はバー挿入口からオイルが飛散するため、パーパータオルを上図のように当てることをおすすめします。

- ⚠ 回転中にプッシュボタンを押すとチャック部が破損するおそれがあります。

- ⑥ パーパータオル等を敷いた台の上にハンドピースを立てて10分ほど置きます。

