

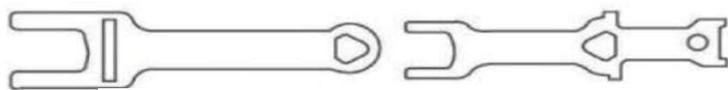
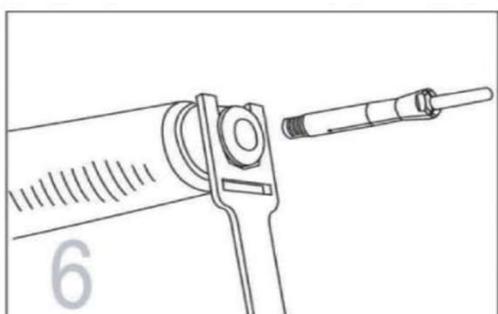
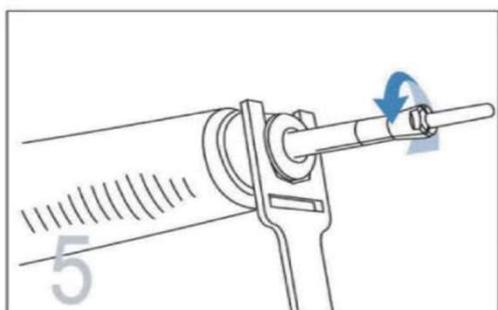
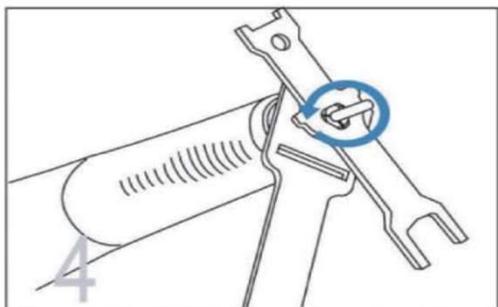
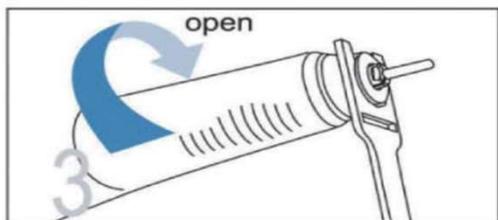
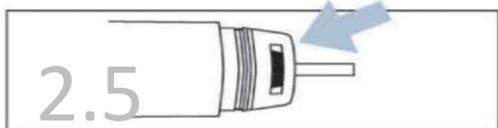


ストロング207・ローターB135 チャック交換・清掃手順

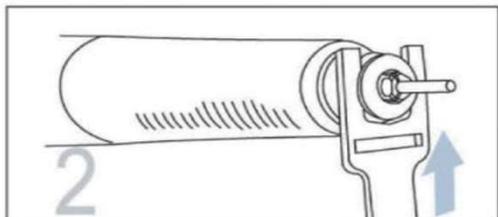

スパナA

スパナB

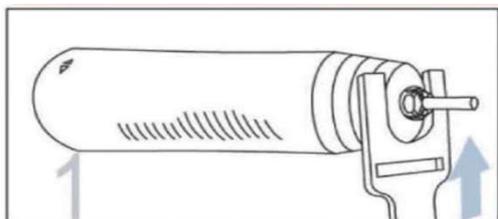

ハンドピースにテストバーを付けロックした状態から
下記の手順でコレットチャックを取り外す。

1.ハンドピース先端部の溝にスパナAをかける。

この時、テストバーを回し、左図2.5にあるように溝の
窓から見て内側が平な面を向ける。

2.スパナAが奥までかかっているか確認する。

3. ハンドピースを回転させ、バーのロックを解除する。

4.スパナB中央部の穴にコレットチャック先端をセットし、
スパナAを押さえながらスパナBを反時計回りに回す。
コレットチャックが手で回転するまで緩める。

5.コレットチャックが緩んだら手で反時計回りに回転させ
スピンドルを外す。

6.コレットチャックが外れたら、清掃行う。

**※組み立ては逆の手順で行い、正常に回転するか確認して
から使用する。**