

15. 注水口の掃除

注水スプレーの出が悪くなったら、専用のクリーニングニードル（付属品）でハンドピースの注水口を掃除してください。



専用のクリーニングニードル（付属品）以外で掃除したり、ニードルを斜めに差したり、強く差し込んだりしないでください。水回路にダメージを与えるおそれがあります。



- ① ハンドピースにテストバーを装着し、5 秒程度注水して注水口内部の汚れを洗い流します。



- ② テストバーを取りはずし、ハンドピースの注水口（4箇所）をクリーニングニードル（付属品）でまっすぐ軽くつつきます。



- ③ テストバーを装着し、注水して、注水口内部の汚れを洗い流します。



- ④ 注水スプレーが十分に出るようになるまで、手順②～③を繰り返します。



👇 5、6 回繰り返しても十分なスプレーが出てこない場合は、ご購入先にご連絡ください。